

# Instructiekaart

## Morita Veraview IC-5 HD



### Panoramische opnames

#### Vorbereiding

- Zorg ervoor dat de computer aan staat en uw software actief voor het ontvangen van beelden
- Zet de Morita IC-5 HD aan.  
(Het apparaat kijkt nu of de computer klaar is om beelden te ontvangen.)
- Wanneer het lampje bij Ready knippert dient éénmaal op de **Ready** knop gedrukt te worden.
- Vraag de patiënt oorbellen, haardspeldjes en andere sieraden uit te doen.

#### Positionering

- Begeleid de patiënt naar het apparaat zodat de kin stevig in de kin steun leunt
- Zorg ervoor dat het apparaat iets te hoog staat (en dus de kin van de patiënt te hoog)
- Vraag de patiënt de benen bij elkaar te zetten en langzaam voorruit te lopen totdat de voeten de staander van het apparaat raken.

#### Positioneer de patiënt in onderstaande volgorde:


- 1 Mid-Sagital vlak
- 2 Frankfurter vlak
- 3 Image layer

#### Positioneer nogmaals in onderstaande volgorde:

- 1 Frankfurter vlak
- 2 Image layer

#### Opname

- Sluit de hoofdsteun
- Vraag de patiënt het volgende :
  - Tong tegen het gehemelte houden.
  - Stil te staan tijdens de opname.
  - Niet te slikken tijdens de opname.
- Druk op de **opname knop** tot de opname volledig is.
- Wacht tot het beeld op het scherm verschijnt.  
(de IC-5 HD piept tijdens het overbrengen van het beeld naar de PC)

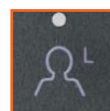

OPT opname



Bevestigen opname stand



- |                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| 1 OPT volwassenen | 5 Omlaag                                   | (omhoog/omlaag) |
| 2 OPT kind        | 6 Laser aan                                |                 |
| 3 TMJ opname      | 7 Ready knop                               |                 |
| 4 Omhoog          | 8 Frankfurter bundel                       |                 |
|                   | 9 Bediening voor- en achterwaarts beweging |                 |

# Instructiekaart


## Morita Veraview IC-5 HD



### Positioneringdetails


#### 1 Mid-sagittaal vlak positionering

De verticale lichtbundel dient door het midden van het gezicht te lopen. De patiënt zelf dient het hoofd te draaien totdat dit in orde is. De patiënt ziet dit met behulp van de spiegel.

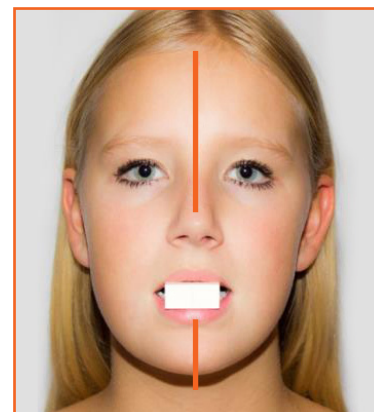

#### 2 Frankfurter vlak positionering

Het frankfurter vlak wordt goed ingesteld door het apparaat in hoogte te doen zakken totdat de lichtbundel hetzelfde staat als op de illustratie. Het is belangrijk dat de patiënt met de nek een scharnierende beweging maakt totdat het frankfurter vlak juist gepositioneerd is. De hoogte van de lichtbundel is door middel van het bedieningspaneel te realiseren.

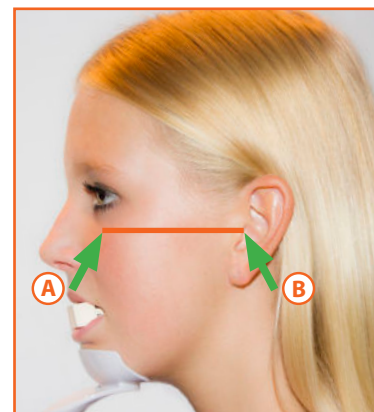

#### 3 Image-Layer positionering

Deze positionering geschied door de verticale lichtbundel distaal van het element **23** te projecteren.

- Druk op de voor achterwaarts knop en houdt deze vast
- Draai nu aan de knop (het hoofd van de patient beweegt voor- of achterwaarts) totdat de verticale bundel distaal van de 23 staat
- Vergrendel de positie door nogmaals op de knop te drukken

#### LET OP:

Het kan voorkomen dat door deze beweging het frankfurter vlak niet meer correct ingesteld staat. Controleer dit en pas eventueel aan.

